



POSICIÓN ÓPTIMA DEL CIRCUITO AquaVENT® VT PARA VENTILADOR

- Configura el circuito de manera que el conector del puerto de temperatura (ubicado en la pieza en Y) esté posicionado por encima de la conexión con la vía aérea.
- Apoya las ramas del circuito donde se sitúe la abrazadera de color naranja preensamblada.

Código	Descripción	Cantidad por caja
AMVC1775-128	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito de ventilador para adulto AquaVENT® VT • Doble rama calefactada para ser usada con humidificadores con calentador servocontrolado • Rama inspiratoria calefactada con 1.5 m de largo • Rama espiratoria calefactada y transpirable • Rama de humidificación de 0.45 m • Filtro respiratorio bacteriano-viral • Cámara de humidificación auto rellenable 	20

