

V2 NIV Gesichtsmasken

Tips für erfolgreiche NIV



Non-Vented



Non-Vented +
Anti-Asphyxie Ventil



CO₂ Vented +
Anti-Asphyxie Ventil



Unbelüftet
Bronchoskopie-Maske

ANWEISUNGEN GELTEN FÜR ALLE MASKENTYPEN

Bestimmen sie bei jedem Patienten die Größe

Kleinere Maskengrößen

Die gängigsten Größen sind Petite, XS und S, die den Masken der Konkurrenz in den Größen S, M und L entsprechen.

AM
MEISTEN
BENUTZTE
GRÖSSEN.

(P)
(XS)
(S)

Bei der Anpassung helfen oft kleinen Dinge

Die Kinnschale sorgt für Stabilität und Komfort und verhindert, dass die Maske auf das Gesicht des Patienten rutscht. Sie sorgt für eine sichere Abdichtung und verhindert so Therapieunterbrechungen.



Schritt 1

Legen Sie das Kinn des Patienten in den Kinnstabilisator und bringen Sie die Maske vorsichtig nach oben, um den Mund zu bedecken und den Nasenrücken abzudichten.

Schritt 2

Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf des Patienten und befestigen Sie die unteren Riemenclips wieder.

Schritt 3

Passen Sie die oberen und unteren Klettbander durch leichtes Ziehen an, um die Maske an Ort und Stelle zu halten. Passen Sie die Riemen am Scheitel des Kopfes an, um einen sicheren und bequemen Sitz zu gewährleisten.

Schritt 4

Die Maske sollte so aussehen, wenn sie **KORREKT ANGEPASST** ist.



Richtig anpassen nicht zu eng

Dies ist eine **Niederdruck-Maskendichtung**. Um eine Abdichtung zu erreichen, ist ein **fester Sitz nicht erforderlich**.

Festes Anziehen des Kopfbandes ist oft eine Reaktion auf schlechten Maskensitz und kann zu **Druckstellen** und zur **Verletzung des Patienten** führen

Die einzigartige **Doppeldichtung** bietet einen bequemen Sitz bei **minimalem Hautdruck**.



ZU
HOCH



ZU
TIEF

GENAU RICHTIG

