

HINWEISE UND TIPPS

V2 NIV-Gesichtsmasken

Keith

Produktionsmitarbeiter
ist 1,80 m groß, seine
V2-Masken-Größe ist **XS**



MESSEN UND AUSWÄHLEN DER RICHTIGEN GRÖSSE


Bitte beachten Sie, dass unsere Maskengrößen speziell entwickelt wurden, um eine optimale Passform und Abdichtung für eine vielfältige Patientengruppe zu gewährleisten. Sie entsprechen nicht direkt den üblichen Größen S/M/L anderer Hersteller. Unsere kleine Maske ist beispielsweise in ihrer Größe mit der mittleren Größe der meisten Marken vergleichbar.

Verwenden Sie immer die Größentabelle, um die richtige Passform zu ermitteln und die Therapieeffizienz zu maximieren.



SCHRITT 1

Stellen Sie sicher, dass die Gesichtsmuskeln des Patienten entspannt sind und der Kiefer geschlossen ist. Setzen Sie die Oberseite der Größentabelle auf den Nasenrücken.

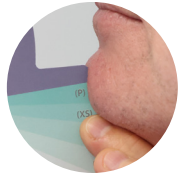

Notieren Sie sich die Größenmarkierung, bei der die Unterseite des Kinnohrens mit der Lehre übereinstimmt. Falls Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für eine bessere Abdichtung.



TIPP

Patienten mit Bartwuchs, ausgeprägtem Gesichtsgewebe oder überschüssiger Haut um den Hals benötigen möglicherweise eine größere Größe für einen effektiven Sitz. Für Patienten mit kleinen Gesichtszügen oder ohne Zähne ist möglicherweise eine kleinere Maske erforderlich.

ANLEGEN DER MASKE



SCHRITT 2

Nehmen Sie die ausgewählte Maske aus der Verpackung. Befestigen Sie die beiden oberen Bänder an den oberen Clips. Das Etikett sollte nach außen zeigen.



SCHRITT 3

Positionieren Sie die Maske, indem Sie sie vom Kinn nach oben rollen und Mund und Nase bedecken, um eine Abdichtung zu erzielen. Die Kinnschale sorgt für Stabilität und Komfort und verhindert ein Hochrutschen in das Sichtfeld des Patienten.



SCHRITT 4

Schieben Sie die Kopfbänderung vorsichtig über den Kopf des Patienten und befestigen Sie die unteren Riemen auf beiden Seiten.



SCHRITT 5

Passen Sie die Klettverschlüsse an, während Sie dem Patienten gegenüberstehen, um die Maske bequem an die Gesichtskonturen anzupassen.



TIPP

Nicht zu fest anziehen – zwischen dem Riemen und der Haut des Patienten sollte ein Finger Platz haben.

DICHTHEITSPRÜFUNG UND ANPASSUNGEN



SCHRITT 6

Bitten Sie den Patienten, tief auszuatmen, und überprüfen Sie, ob an Nase, Wangen oder unter dem Kinn Undichtigkeiten vorhanden sind.



SCHRITT 7

Passen Sie bei Bedarf den Riemen am Scheitel an, um geringfügige Undichtigkeiten zu beheben. Dadurch werden Beschwerden minimiert und eine stabile Abdichtung gewährleistet.



TIPP

Die V2-Maske verfügt über eine doppelte Abdichtung an der Nasenbrücke, sodass ein zu festes Anziehen nicht erforderlich ist.



HINWEISE UND TIPPS

GRÖSSENBESTIMMUNG DER MASKE:

Anhand der Längenmaße wird die Größe der V2-NIV-Maske bestimmt, die am besten zum Patienten passt. Es sind 5 Größen erhältlich, wobei P/XS/S am häufigsten verwendet werden.

ENTFERNEN DER MASKE:

Lösen Sie die beiden unteren Schnellverschlüsse, rollen Sie die Kopfbänder über den Kopf zurück und heben Sie dann die Maske von Nase und Kinn ab.

HAUTSCHUTZ:

- Führen Sie bei der Aufnahme und alle 4 Stunden während der NIV-Therapie eine Beurteilung der Gesichtshaut durch.^[1]
- Wenn ein blanchierbares oder nicht-blanchierbares Erythem beobachtet wird, bringen Sie einen dünnen Schaumverband (z. B. unter dem Nasenrücken oder Kinn) an, um den Druck neu zu verteilen.^[1]

SCHUTZ DER NASENWURZEL:

Der tiefe Dichtungsflansch an der Nasenwurzel sorgt für eine Niederdruckabdichtung und verringert die Neigung zu übermäßigem Anziehen. Nasenschleimhautgeschwüre, die durch zu festes Anziehen verursacht werden können, sind das häufigste Problem (5–10 %) während der NIV-Therapie und können so schwerwiegend sein, dass sie zum Versagen der NIV führen.^[2]

BEFESTIGUNG DER NG-SONDE:

Bringen Sie vor dem Anlegen der Maske eine Metro Seal™ NG-Befestigungsvorrichtung an, um Undichtigkeiten zu reduzieren.

ALTERNATIVE THERAPIEN:

Ziehen Sie intermittierende Pausen mit Nasenkanüle oder High-Flow-Sauerstoff in Betracht, um den Komfort aufrechtzuerhalten und eine gebündelte Pflege (z. B. Medikamente, Mundpflege) zu ermöglichen.^[2,3]

METRO SEAL™




SCHRITT 1

Markieren Sie die Stelle, an der der Schlauch den Dichtungsflansch der Maske kreuzt, und reinigen Sie dann den Bereich auf dem Gesicht des Patienten.



SCHRITT 2

Ziehen Sie die Schutzfolie ab, um die Klebefläche freizulegen.

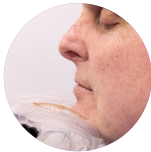

SCHRITT 3

Richten Sie das Metro Seal™ an der markierten Stelle aus und bringen Sie es auf dem Gesicht des Patienten an, wobei Sie darauf achten, dass seine Krümmung dem Maskenflansch folgt.



SCHRITT 4

Legen Sie den Schlauch in die freiliegende Nut des Metro Seal™.



SCHRITT 5

Setzen Sie die Maske auf den Patienten, um sicherzustellen, dass das Metro Seal™ vollständig bedeckt und korrekt positioniert ist; positionieren Sie es gegebenenfalls neu.



SCHRITT 6

Setzen Sie die Maske und die Kopfbänderung wie gewohnt auf und überprüfen Sie dann visuell, ob das Metro Seal™ richtig ausgerichtet ist und keine Undichtigkeiten vorliegen. Nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.

VERGLEICH DER MASKENGROSSEN

Eakin Healthcare V2 Maskengrößen

Gängige Maskengrößen von Mitbewerbern

<i>Am häufigsten bestellt</i>				
P	XS	S	M	L
XS	S	M	L	XL

Literaturhinweise:

1. Gefen, Amit, et al. "Device-Related Pressure Ulcers: SECURE Prevention. Second Edition." Journal of Wound Care, vol. 31, no. Sup3a, 1 Mar. 2022, pp. S1–S72, <https://doi.org/10.12968/jowc.2022.31.sup3a.s1>.
2. Davidson, A Craig, et al. "BTS/ICS Guideline for the Ventilatory Management of Acute Hypercapnic Respiratory Failure in Adults." Thorax, vol. 71, no. Suppl 2, 14 Mar. 2016, pp. ii1–ii35, <https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2015-208209>.
3. Amir Emami Zeydi, et al. "Mask-Related Pressure Injury Prevention Associated with Non-Invasive Ventilation: A Systematic Review." International Wound Journal, vol. 21, no. 6, 1 June 2024, <https://doi.org/10.1111/iwj.14909>.



eakinrespiratory.com

Vertrieb durch Armstrong Medical
Wattstown Business Park,
Newbridge Road,
Coleraine, BT52 1BS,
Nordirland.
T +44 (0) 28 7035 6029
info@eakinrespiratory.com