

Manual de uso

Estas instrucciones deben leerse junto con las instrucciones de uso suministradas con el circuito respiratorio específico, el controlador de flujo y el calentador humidificador.

PARA MONTAR EL SISTEMA

Paso 1

Inserte la cámara de humidificación en la placa del calentador humidificador.



Paso 2

Retire los tapones antipolvo (a) y desenrolle el tubo de entrada de agua (b).



Paso 3

Conecte la válvula limitadora de sobrepresión con el ramal de humidificación no calefactado a la cámara.



Paso 4

(a) Si es necesario, use un adaptador
(b) Conecte el ramal de humidificación a la salida de flujo de gas del FD140i.



Paso 5

Conecte el ramal inspiratorio calefactado a la cámara de humidificación.



Manual de uso

Estas instrucciones deben leerse junto con las instrucciones de uso suministradas con el circuito respiratorio específico, el controlador de flujo y el calentador humidificador

Paso 6

1. Conecte el cable del calentador.
2. Conecte las sondas de temperatura a los puertos localizados en la cámara (a) y en la vía aérea (b).



Paso 7

Conecte la línea del manómetro al adaptador cilíndrico del ramal inspiratorio.



Paso 8

Conecte la línea del manómetro al puerto de medición de presión del FD140i.




Paso 9

Inserte el recipiente del generador de CPAP Burbujas en el alojamiento correspondiente.



Paso 10

Conecte el ramal espiratorio no calefactado con la trampa de agua al recipiente del generador CPAP de burbujas.

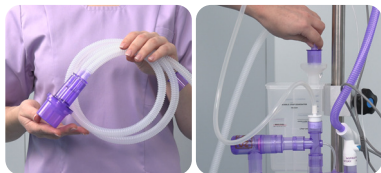

Paso 11

Conecte los extremos de los ramales inspiratorio y espiratorio proximales al paciente a una interfaz de doble rama adecuada para el paciente.



Manual de uso

Estas instrucciones deben leerse junto con las instrucciones de uso suministradas con el circuito respiratorio específico, el controlador de flujo y el calentador humidificador

PARA COMENZAR LA TERAPIA

Paso 1

Encienda el FD140i y seleccione el modo Bubble PAP.



Paso 2

Configure los ajustes de flujo, FiO₂ y alarma deseados.



Paso 3

Llene el recipiente del generador CPAP de burbujas con agua hasta el nivel de llenado.



Paso 4

Introduzca agua estéril en la cámara de humidificación a través de (a) la línea de llenado de agua y una bolsa de agua estéril o (b) llenándola manualmente.



Paso 5

Encienda el calentador humidificador.



Paso 6

Asegúrese de que el calentador esté configurado en modo invasivo

- temperatura de la cámara 37 °C
- temperatura de las vías respiratorias 40 °C



Paso 7

Ajuste la PEEP deseada utilizando la columna del recipiente del generador de burbujas.



Paso 8

Inicie la Bubble PAP en el FD140i.



Paso 9

Coloque la interfaz del paciente al bebé para administrar la terapia.