

Manual de uso

Estas instrucciones deben leerse junto con las instrucciones de uso suministradas con el circuito respiratorio específico, el controlador de flujo y el calentador humidificador




AJUSTES DE LA ALARMA

Alarma	Función	Rango
P. máx.	Establece el límite de alarma de presión alta	0-25 cm H ₂ O
P. mín.	Establece el límite de alarma de presión baja	2-25 cm H ₂ O
Apnea	Se activa si no se detecta respiración	20-60 segundos
F. máx.	Establece la alarma de frecuencia respiratoria máxima	0-60 respiraciones/min

MENÚ DE TERAPIA


1. Pantalla de visualización de frecuencia respiratoria y presión CPAP del paciente
2. Forma de onda respiratoria del paciente
3. Botón de ajuste del flujo de gas y oxígeno del paciente
4. Botón de función del nebulizador
5. Botón de ajustes de alarma
6. Botón del temporizador de terapia

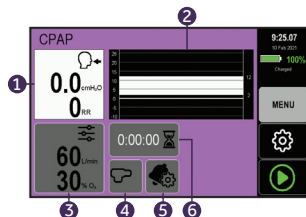

Manual de uso

Estas instrucciones deben leerse junto con las instrucciones de uso suministradas con el circuito respiratorio específico, el controlador de flujo y el calentador humidificador

Paso 1

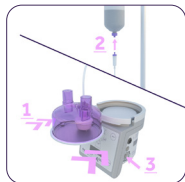

Paso 2



Paso 3




Paso 4




Paso 5



Paso 6

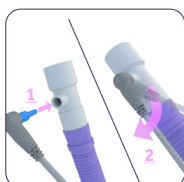

Paso 7

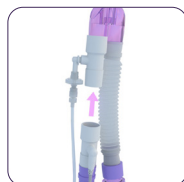


Paso 8



❶ PRUEBA DE PRESIÓN ❶

Paso 9

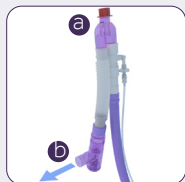


- Inicio la terapia CPAP y ocluya el extremo del paciente con la mano o el tapón rojo.
- Verifique el flujo de gas a través de la válvula PEEP del paciente.

Paso 10



Tapone la válvula PEEP del paciente.

Paso 11

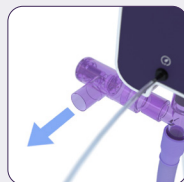

Verifique el flujo de gas a través de la válvula limitadora de presión.

Paso 12

