

### Manual de uso

Estas instrucciones deben leerse junto con las instrucciones de uso suministradas con el circuito respiratorio específico, el controlador de flujo y el resucitador de recién nacidos.

#### Paso 1

Inserte la cámara de humidificación en la placa del calentador humidificador.



#### Paso 2

Retire los tapones antipolvo (a) y desenrolle el tubo de entrada de agua (b).



#### Paso 3

Conecte el ramal de humidificación no calefactado a la cámara.



#### Paso 4

Si es necesario, use un adaptador (a). Conecte el ramal de humidificación a la salida de gas del resucitador (b).



#### Paso 5

Inserte el ramal inspiratorio calefactado en la cámara de humidificación (a) y conecte el cable del calentador (b).



#### Paso 6

Conecte las sondas de temperatura a los puertos localizados en la cámara (a) y en la vía aérea (b).



#### Paso 7

Realice las pruebas de funcionamiento previas al uso según sea necesario, antes del uso clínico.

- Conecte la fuente de flujo de gas y ajuste el caudal de gas entre 5 y 15 l/min.
- Haga las siguientes comprobaciones:
  1. En el codo del paciente, tapone la vía del paciente con un tapón u otro medio de oclusión adecuado.
  2. Tapone el orificio de purga con el dedo pulgar o índice (con guantes).
  3. Ajuste la presión inspiratoria positiva máxima (pPIP) en el dispositivo de administración y compruebe que no se supere durante la oclusión de la vía del paciente y la oclusión del orificio de purga.
  4. Retire todos los medios de oclusión y compruebe que el gas salga por la vía del paciente y por el orificio de purga.



\* imágenes solo con fines ilustrativos

### Manual de uso

Estas instrucciones deben leerse junto con las instrucciones de uso suministradas con el circuito respiratorio específico, el controlador de flujo y el resucitador de recién nacidos.

#### PARA COMENZAR LA TERAPIA

##### Paso 1

Introduzca agua estéril en el sistema mediante el llenado manual (a) o la bolsa de agua estéril (b).



##### Paso 2

Encienda el calentador humidificador.



##### Paso 3

Asegúrese de que el calentador esté configurado en modo invasivo:

- Temp. de la cámara: 37 °C.
- Temp. de las vías respiratorias: 40 °C.



##### Paso 4

Administre PEEP o respiración artificial, según las indicaciones clínicas.



##### Paso 5

Ajuste la PEEP según sea necesario utilizando el dial de PEEP.

