

### Manual de uso

Estas instrucciones deben leerse junto con las instrucciones de uso suministradas con el circuito respiratorio específico, el controlador de flujo y el resucitador de recién nacidos.

#### TRANSICIÓN A LA nCPAP

##### Paso 1

Desconecte el adaptador en T corto (a) del ramal inspiratorio calefactado y retire el conector recto morado (b).



##### Paso 2

Conecte el tubo para incubadora CPAPn suministrado con la línea de presión.



##### Paso 3

Conecte el generador CPAPn suministrado con una interfaz nasal adecuada.



##### Paso 4

Desconecte el tubo de humidificación de la salida de gas del dispositivo de reanimación y retire la cámara de humidificación del humidificador, si es necesario.



##### Paso 5

Inserte la cámara de humidificación en el humidificador de la máquina CPAPn, si es necesario.



##### Paso 6

Conecte el adaptador al ramal de humidificación, si es necesario.



##### Paso 7

Conecte el ramal de humidificación a la salida de gas de la máquina CPAPn (a) y conecte la línea de presión a la entrada de medición de presión (b).



##### Paso 8

Comience la terapia con CPAPn utilizando el caudal de gas óptimo u otros ajustes de CPAPn, según sea necesario.

##### Paso 9

Conecte el generador de CPAPn al bebé y comience la terapia CPAPn.



### Manual de uso

Estas instrucciones deben leerse junto con las instrucciones de uso suministradas con el circuito respiratorio específico, el controlador de flujo y el resucitador de recién nacidos.

#### TRANSICIÓN A LA TERAPIA DE OXÍGENO DE ALTO FLUJO (HFOT)

##### Paso 1

Desconecte el adaptador en T corto (a) del ramal inspiratorio calefactado y retire el conector recto morado (b).



##### Paso 2

Conecte una cánula nasal HFOT del tamaño adecuado.



##### Paso 3

Coloque la válvula limitadora de sobrepresión suministrada entre el ramal de humidificación y la cámara de humidificación.



##### Paso 4

Desconecte el ramal de humidificación de la salida de gas del dispositivo de reanimación.



##### Paso 5

Conecte el adaptador al ramal de humidificación, si es necesario.



##### Paso 6

Conecte el ramal de humidificación a la salida de gas auxiliar u otra fuente de suministro de gas adecuada y active el ajuste de caudal de gas requerido.



##### Paso 7

Fije la cánula al bebé (a) y comience la terapia de oxígeno de alto flujo (b).

