

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Mascarillas para VNI V2

Keith

Operario de producción
mide 1,8m, el tamaño de
su mascarilla V2 es **XS**



MEDICIÓN Y SELECCIÓN DEL TAMAÑO CORRECTO

Tenga en cuenta que los tamaños de nuestras mascarillas están diseñados de forma única para optimizar el ajuste y el sellado en una población de pacientes diversa. No se corresponden directamente con los tamaños S, M o L habituales empleados por otros fabricantes. Por ejemplo, nuestra mascarilla pequeña tiene un tamaño comparable al tamaño mediano de la mayoría de las marcas. **Utilice siempre la guía de tallas para determinar el ajuste correcto y optimizar el rendimiento de la terapia.**




PASO 1

Asegúrese de que los músculos faciales del paciente están relajados y que tiene la mandíbula cerrada. Coloque la parte superior de la guía de tallas en el puente nasal.



CONSEJO

Los pacientes con barba, tejido facial prominente o exceso de piel alrededor del cuello pueden necesitar un tamaño mayor para un ajuste eficaz. En el caso de los pacientes con rasgos pequeños o sin dientes, puede ser necesaria una mascarilla más pequeña.

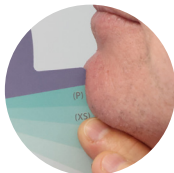

Observe la marca de tamaño que aparece donde la parte inferior del hueso del mentón coincide con la guía de tallas. Si está entre dos tamaños, seleccione el más pequeño para un mejor sellado.

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA



PASO 2

Extraiga la mascarilla elegida del envase. Sujete las dos correas en los ganchos superiores. La etiqueta debe mirar hacia arriba.



PASO 3

Coloque la mascarilla comenzando por la barbilla y hacia arriba, cubriendo la boca y la nariz para crear un cierre hermético. La mentonera proporciona estabilidad y comodidad, y evita el movimiento hacia arriba de la mascarilla en la línea de visión del paciente.



PASO 4

Deslice con delicadeza la correa por la cabeza del paciente y abroche las correas inferiores a ambos lados.



PASO 5

Mirando hacia el paciente, ajuste las correas de Velcro® para que la mascarilla se ajuste cómodamente a los contornos faciales.



CONSEJO

No lo ajuste en exceso; debe haber un dedo entre la correa y la piel del paciente.

COMPROBACIÓN DE FUGAS Y AJUSTES



PASO 6

Pida al paciente que espire profundamente y compruebe que no haya fugas en torno a la nariz, las mejillas o bajo la barbilla.



PASO 7

Si es necesario, ajuste la correa en la coronilla para corregir fugas menores. Esto reduce la incomodidad al mínimo y mantiene un sellado estable.



CONSEJO

La mascarilla V2 tiene un diseño de doble sellado en el puente de la nariz, por lo que no es necesario ajustarla en exceso.



CONSEJOS Y SUGERENCIAS

TAMAÑO DE LA MASCARILLA:

Las longitudes se utilizan para determinar el tamaño de la mascarilla V2 VNI que mejor se adapta al paciente. Aunque existen 5 tamaños, los más frecuentes son P, XS, S.

RETIRADA DE LA MASCARILLA:

Suelte los dos cierres de liberación rápida inferiores, vuelva a enrollar las correas sobre la cabeza y, a continuación, levante y retire la mascarilla de la nariz y la barbilla.

PROTECCIÓN DE LA PIEL:

- Evalúe la piel del rostro en el momento del ingreso y cada 4 horas durante la terapia de VNI.^[1]
- Si se observa eritema blanqueable o no blanqueable, aplique un apósito de espuma fino (p. ej., bajo el puente de la nariz o la barbilla) para redistribuir la presión.^[1]

PROTECCIÓN DEL PUENTE NASAL:

La brida de sellado firme en el puente de la nariz proporciona un sellado con baja presión, lo que reduce la tendencia al ajuste excesivo. La úlcera en el puente de la nariz, que puede estar causada por un ajuste excesivo, es el problema más frecuente (5-10 %) durante la terapia de VNI y puede ser lo bastante grave como para causar el fracaso de esta terapia.^[2]

FIJACIÓN DE LA Sonda NASOGÁSTRICA:

Coloque el dispositivo de sujeción para sonda nasogástrica Metro Seal™ antes de ajustar la mascarilla para reducir las fugas.

OTRAS TERAPIAS:

Piense en la posibilidad de hacer pausas con la cánula nasal o el oxígeno de alto flujo para mantener la comodidad y permitir la concentración de los cuidados (p. ej. medicamentos, cuidado bucal).^[2,3]

METRO SEAL™



PASO 1

Identifique y marque el lugar en el que el tubo se cruza con la brida de sellado de la mascarilla; a continuación, limpie esa zona del rostro del paciente.



PASO 2

Despegue la película protectora para dejar el adhesivo a la vista.



PASO 3

Haga coincidir el Metro Seal™ con la localización marcada y colóquelo en la cara del paciente, asegurándose de que su curvatura siga la brida de la mascarilla.



PASO 4

Coloque el tubo en la ranura a la vista del Metro Seal™.



PASO 5

Póngale la mascarilla al paciente para confirmar que el Metro Seal™ está totalmente cubierto y correctamente colocado; recolóquela si es necesario.



PASO 6

Ajuste la mascarilla y la correa como siempre, y confirme visualmente que el Metro Seal™ esté correctamente alineado y que no haya fugas; ajústelo si es necesario.

COMPARACIÓN DE TAMAÑOS DE MASCARILLA

Tamaños de mascarillas
Eakin Healthcare V2

Tamaños habituales de las
mascarillas de la competencia



XS S M L XL

Bibliografía:

1. Gefen, Amit, et al. "Device-Related Pressure Ulcers; SECURE Prevention. Second Edition." Journal of Wound Care, vol. 31, no. Sup3a, 1 Mar. 2022, pp. S1–S72, <https://doi.org/10.12968/jowc.2022.31.sup3a.s1>.
2. Davidson, A Craig, et al. "BTS/ICS Guideline for the Ventilatory Management of Acute Hypercapnic Respiratory Failure in Adults." Thorax, vol. 71, no. Suppl 2, 14 Mar. 2016, pp. ii1–ii35, <https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2015-208209>.
3. Amir Emami Zeydi, et al. "Mask-Related Pressure Injury Prevention Associated with Non-Invasive Ventilation: A Systematic Review." International Wound Journal, vol. 21, no. 6, 1 June 2024, <https://doi.org/10.1111/iwj.14909>.



eakinrespiratory.com

Distribuido por Armstrong Medical
Wattstown Business Park,
Newbridge Road,
Coleraine, BT52 1BS,
Irlanda del Norte.
T +44 (0) 28 7035 6029
info@eakinrespiratory.com