

### Manual de uso

Estas instrucciones deben leerse junto con las instrucciones de uso suministradas.

#### Paso 1

- Mida al bebé para ver la talla del gorro NeoFlow® con la cinta de medir proporcionada.
- Colóquela en la nuca del bebé y llévela hacia la frente.



#### Paso 2

Colóquela sobre la frente del bebé para seleccionar el tamaño y el color en el indicador.



#### Paso 3

Seleccione el tamaño del gorro según las medidas.

|             |                                                                                   |           |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| AMBT100/XXS |  | Prematuro | Hasta 24 cm   |
| AMBT100/XS  |  | XS        | De 24 a 28 cm |
| AMBT100/S   |  | S         | De 28 a 31 cm |
| AMBT100/M   |  | M         | De 31 a 34 cm |
| AMBT100/L   |  | L         | De 34 a 38 cm |
| AMBT100/XL  |  | XL        | De 38 a 42 cm |

#### Paso 4

Abra el gorro y colóquelo en la nuca del bebé. Asegúrese de que el lado suave quede contra la cabeza del bebé y que las costuras de color estén en la parte superior.



#### Paso 5

Ajústelo para cubrir las orejas y envolver cómodamente la frente del bebé.



#### Paso 6

Abróchelo con las tiras de Velcro®.

