

Eakin Healthcare V2 Maskengröße	<b>P</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	M	L
Äquivalente Wettbewerbergröße	XS	S	M	L	XL

# V2 NIV-Gesichtsmasken ANPASSUNGSANLEITUNG

## AUSMESSEN



➊ Verwenden Sie immer die Messhilfe, um die richtige Passform zu ermitteln und die bestmögliche Therapieleistung zu erzielen.

### SCHRITT 1

Stellen Sie sicher, dass die Gesichtsmuskulatur des Patienten entspannt und der Kiefer geschlossen ist.

Setzen Sie das Oberteil der Messhilfe an den **Nasenrücken** an und notieren Sie die Größenmarkierung an der Stelle, an der die Unterkante des **Kinnknochens** mit der Messhilfe übereinstimmt. Das ist die ausgewählte Maskengröße.

## ANLEGEN



### SCHRITT 2

Nehmen Sie die ausgewählte Maske aus der Verpackung. Befestigen Sie die beiden oberen Haltebänder an den oberen Clips. Das Etikett sollte nach außen zeigen.



### SCHRITT 3

Positionieren Sie die Maske, indem Sie sie vom Kinn nach oben rollen, sodass Mund und Nase bedeckt sind und eine dichte Versiegelung entsteht.



### SCHRITT 4

Schieben Sie das Kopfband vorsichtig über den Kopf des Patienten und befestigen Sie die unteren Riemen auf beiden Seiten.



### SCHRITT 5

Stehen Sie dem Patienten gegenüber und passen Sie die Klettverschlüsse an, um die Maske bequem an die Gesichtskonturen anzupassen.

## DICHTIGKEITSPRÜFUNG



### SCHRITT 6

Bitten Sie den Patienten, tief auszuatmen, und überprüfen Sie, ob an Nase, Wangen oder unter dem Kinn Undichtigkeiten vorhanden sind.



### SCHRITT 7

Passen Sie bei Bedarf das Kopfband am Scheitel an, um leichte Undichtigkeiten zu beheben. Dies minimiert Druckstellen und sorgt für einen stabilen, dichten Sitz.



Unbelüftet



Unbelüftet +  
Anti-Asphyxie-Ventil



CO<sub>2</sub>-belüftet +  
Anti-Asphyxie-Ventil



Bronchoskopie  
unbelüftet

Scannen Sie hier für unsere Tipps & Tricks

