

Gebrauchsanleitung

Diese Anleitung muss zusammen mit der Gebrauchsanweisung gelesen werden, die im Lieferumfang des jeweiligen Beatmungsschlauchsystems, Durchflussreglers und Heiz- und Befeuchtungsgeräts enthalten ist.




ALARMEINSTELLUNGEN

Alarm	Funktion	Bereich
P Max	Legt den Grenzwert für den Hochdruckalarm fest	0-25 cm H ₂ O
P Min	Legt den Grenzwert für den Niederdruckalarm fest	2-25 cm H ₂ O
Apnoe	Löst aus, wenn keine Atmung erkannt wird	20-60 Sekunden
F Max	Legt den Alarm für die maximale Atemfrequenz fest	0-60 Atemzüge/Minute

THERAPIE-MENÜ


1. Anzeige der Atemfrequenz des Patienten und des CPAP-Drucks
2. Atemkurve des Patienten
3. Taste für Patienten-Gasfluss und Sauerstoffeinstellungen
4. Funktionstaste für Vernebler
5. Taste für Alarmeinstellungen
6. Taste für Therapie-Timer

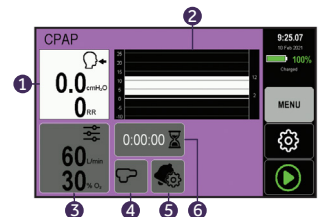


Gebrauchsanleitung

Diese Anleitung muss zusammen mit der Gebrauchsanweisung gelesen werden, die im Lieferumfang des jeweiligen Beatmungsschlachsystems, Durchflussreglers und Heiz- und Befeuchtungsgeräts enthalten ist.


Schritt 1

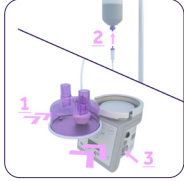

Schritt 2

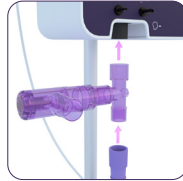

Schritt 3

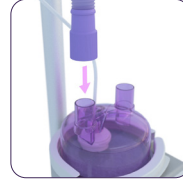


Schritt 4




Schritt 5



Schritt 6

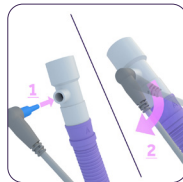

Schritt 7

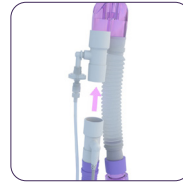


Schritt 8




DRUCKPRÜFUNG

Schritt 9

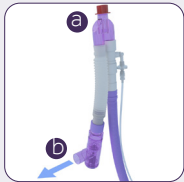


- a. CPAP-Therapie beginnen und Patientenseite mit der Hand oder der roten Kappe verschließen.
- b. Gasfluss durch das PEEP-Ventil des Patienten überprüfen.

Schritt 10

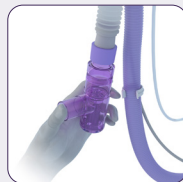

PEEP-Ventil des Patienten verschließen.

Schritt 11

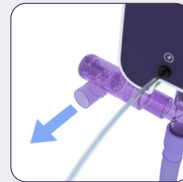

Gasfluss durch das Druck-Entlastungsventil überprüfen.

Schritt 12

