

Manual de uso

Estas instrucciones deben leerse junto con las instrucciones de uso suministradas.

Paso 1

- Mida al bebé para ver la talla del gorro NeoFlow® con la cinta de medir proporcionada.
- Colóquela en la nuca del bebé y llévela hacia la frente.



Paso 2

Colóquela sobre la frente del bebé para seleccionar el tamaño y el color en el indicador.



Paso 3

Seleccione el tamaño del gorro según las medidas.

AMBT100/XXS	● Prematuro	Hasta 24 cm
AMBT100/XS	● XS	De 24 a 28 cm
AMBT100/S	● S	De 28 a 31 cm
AMBT100/M	● M	De 31 a 34 cm
AMBT100/L	● L	De 34 a 38 cm
AMBT100/XL	● XL	De 38 a 42 cm

Paso 4

Abra el gorro y colóquelo en la nuca del bebé. Asegúrese de que el lado suave quede contra la cabeza del bebé y que las costuras de color estén en la parte superior.



Paso 5

Ajústelo para cubrir las orejas y envolver cómodamente la frente del bebé.



Paso 6

Abróchelo con las tiras de Velcro®.

